



ARKONA

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY

ZAWARTOŚĆ

Zestaw zawiera strzykawkę wypełnioną $\pm 2,6\text{g}$ (2ml) lub $\pm 6,5\text{g}$ (5ml) lub $\pm 13\text{g}$ (10 ml) preparatu w postaci żelu (substancja czynna 36% kwas o-fosforowy) + końcówki do **Wytrawiacza**.

WSKAZANIA

Wytrawianie szkliva za pomocą **Wytrawiacza** służy do zwiększenia przyczepności i utrzymania uzupełnień stomatologicznych. Zabezpiecza przed występowaniem szczeliny brzeżnej.

Może być stosowany przy:

- wypełnieniach chemo- i światło utwardzalnych,
- lakach szczelinowych,
- ortodontycznych aparatach stałych.

SPOSÓB UŻYCIA

Na dokładnie oczyszczoną i osuszoną powierzchnię szkliva nałożyć cienką warstwę **Wytrawiacza**. Pozostawić na zębie około 30 - 60 sekund. Następnie przepłukać silnym strumieniem wody. Dokładnie osuszyć aż szklivo uzyska matowo-biały kolor. Wytrawianie należy powtórzyć jeśli szklivo nie zmatowieje lub zostanie zanieczyszczone śliną.

Nie wytrawiać dłużej niż 120 s.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas wytrawiania poleca się stosowanie osłon oczu dla pacjenta i personelu. Unikać kontaktu z oczami, miękkimi tkankami jamy ustnej oraz skórą. W razie kontaktu przepłukać dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami natychmiast poradzić się specjalisty.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić przed dostępem osób niepowołanych.

GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty, które posiadają sprawdzone wady lub zwraca kaszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.

Termin ważności 3 lata.

ulotka nr 10, ważna od 01.03.2011

ARKONA

LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ

CE 0120

ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

Nasutów 99 C
21-025 Niemce, EU

tel. +48 81 470 57 00
fax +48 81 463 54 63
www.arkonadent.com

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY



ARKONA